

Termómetro Non Contact Por Infravermelho

Peso: 85g | **Modelo de temperatura:** 32°C ~ 42.9°C | **Modo de superfície:** 0°C

Temperatura de uso normal: temperatura ambiente: 10°C ~ 40°C

Precisão: erro de medição $\leq \pm 0,3$ graus. (sistema de detecção por infravermelho) **Rápido:** tempo de medição <1 segundo

Desligamento automático: 60 segundos | **Fácil de usar:** medição de um botão, operação simples

Sem contato: medição na testa humana, sem tocar na pele

Longa vida útil: instale baterias 2xAA (não incluídas), que podem ser usadas mais de 100000 vezes, e a vida útil do produto é mais de 3 milhões de vezes

Distância de medição: pode ser ajustado dentro de 5-15cm sem distância de medição fixa

Tela grande: tela grande LCD, luz de fundo branca, qualquer luz pode ser claramente exibida

Alarme de temperatura: a temperatura do alarme pode ser ajustada livremente

Armazenamento de dados: 32 dados de medição são armazenados para análise, referência e comparação

Como ligar / desligar a alimentação:

1. Pressione o botão M para ligar a energia
2. Pressione o botão M novamente para desligar a energia

Desligamento automático sem operação em 60 segundos

Como medir a temperatura:

1. Ligue o dispositivo | 2. 15-50mm na testa | 3. Pressione o botão de medição para medir a temperatura da testa

Interruptor do modo de medição: Pressione o botão "-" para alternar entre o modo de temperatura da superfície e o modo de temperatura do corpo

Altere entre Celsius e Fahrenheit: Pressione e mantenha pressionado o botão "-" por 5 segundos e o símbolo F1 aparecerá na tela

Em seguida, pressione o botão "-" 3 vezes para exibir o símbolo F4 na tela

Desligue a energia para salvar as configurações

Como visualizar o histórico:

1. Desligue o dispositivo e pressione o botão "+" para visualizar o histórico

Nota: Devido ao diferente monitor e efeito de luz, a cor real do item pode ser ligeiramente diferente da cor mostrada nas fotos. Os dados de tamanho são medidos em mosaico, permita um desvio de medição de 1-3 cm devido à medição manual.



REF.: 03305.53895

66,42€

Preço com IVA incluído

CONTACTE-NOS



Horário de Funcionamento:
SEGUNDA A SEXTA
DAS 10h00 / 19h00

Rua de S. Nicolau, 19-25
1100-547 LISBOA | PORTUGAL

Tel.: +351 21 886 62 05
Tel.: +351 96 31 70 938

E-mail: comercial@polycarpo.pt